


ORTHOeasy[®]

*Sistemul complet
pentru ancorarea corticală*

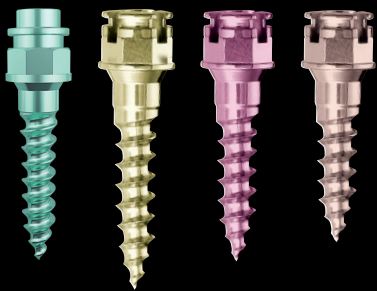





Mini-implanturile OrthoEasy[®]

ORTHOeasy® – ușor de utilizat și economic

OrthoEasy®: Cap inovativ și trei lungimi codificate coloristic pentru toate necesitățile de ancoraj ortodontic.

Colul transgingival conic al implantului sigilează gingia împotriva infecțiilor.

Noul design al vârfului spirelor facilitează pătrunderea sigură și ușoară prin gingie și corticală.

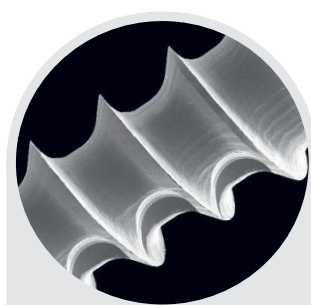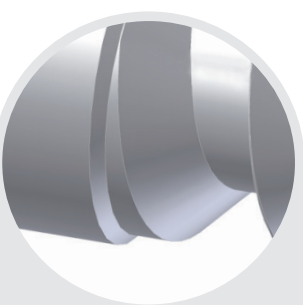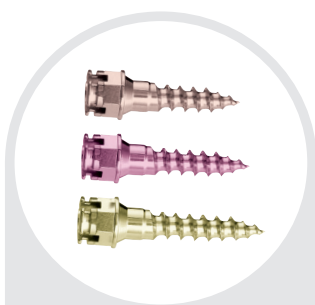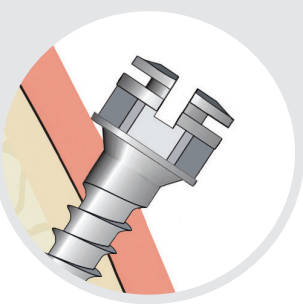

Codificarea lungimii prin anodizarea suprafeței.

Pasul de compresie și stopul pentru adâncime oferă stabilitate crescută prin compactarea mecanică a osului.


Marginile extrem de ascuțite fac câte un pas la fiecare rotație.

Detaliile designului mini-implanturilor OrthoEasy®


Caracteristici	Avantaje
Mini-implanturi auto-tăietoare și auto-forante	Inserare extrem de ușoară
Vârf conic stabil, aproape bont	Afectarea rădăcinii dinților în timpul inserării este puțin posibilă
Se pot folosi cu ajutorul unor freze pilot	Folosită doar în zone cu os compact bine reprezentat (ex: porțiunea anterioară a mandibulei)
Spire extrem de ascuțite	Inserare facilă cu torque redus, presiune scăzută asupra osului, stabilitate primară crescută
Pas de compresie și stop pentru adâncime	Stabilitate primară îmbunătățită
Diametrul mediu al spirelor 1.6 mm (max. 1.7 mm)	Aplicabil în zone cu îngheșuri
Col transgingival conic al implantului (2 mm)	Corespunde grosimii medii a gingiei și acționează asemănător unui dop, sigilând perforația mucoasei într-un mod sigur
Cap universal având design de bracket cu slot în cruce de .022" x .025" (cu excepția OrthoEasy Pal)	Diferite moduri de conexiune, fiind posibilă inserția simultană a două arcuri rectangulare
Cap octogonal	Ajută la localizarea poziției slotului din afară, orientarea și inserarea realizându-se ușor
Marcaj laser la nivelul lamei	Controlul poziției slotului în timpul inserării
Înălțime redusă a capului implantului	Confort crescut pentru pacient
Doar 4 versiuni datorită experienței clinice îndelungate	Stocuri reduse ca dimensiuni și complexitate
Codificare coloristică prin anodizarea suprafeței	Stabilitate primară crescută și diferențierea vizuală facilă a celor 3 dimensiuni
Realizate din aliaj de titan nivel 5 (Ti-6 Al-4V)	Material bio-compatibil al implantului



Pal simbolizează "palatinal", întrucât noul mini-implant a fost conceput pentru ancorajul aparatelor ortodontice la nivelul palatului. De exemplu, dispozitivul Frog poate fi acum atașat mai rapid și mai ușor decât înainte. Până acum, bonturile de laborator cu dispozitivul sudat trebuiau să fie realizate cu o ligatură de sârmă atașată de mini-implanturile inserate în palat. Capul noului OrthoEasy® Pal este prevăzut cu un filet intern astfel încât bonturile pot fi simplu atașate cu un șurub de fixare. Fabricarea dispozitivului în laboratorul ortodontic este facilitată de folosirea unui analog de implant și a unei cape de amprentare.

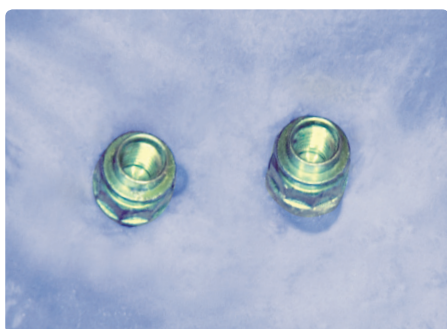

Deschiderea capului OrthoEasy® Pal.



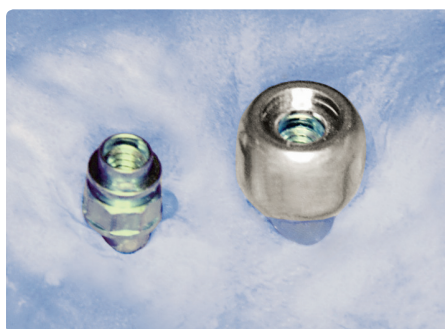


Un opritor este poziționat pe capul șurubului, căruia i se atasează aparatul.



Aparatul este atașat de capul OrthoEasy® Pal.


Cod		Mărire	Dimensiune	OrthoEasy	OrthoEasy Pal
1101A2306	 6 mm	6 x 1,7 mm Slot .022"	5		—
1101A2308	 8 mm	8 x 1,7 mm Slot .022"	5		—
1101A2310	 10 mm	10 x 1,7 mm Slot .022"	5		—
1201A2308	 8 mm	8 x 1,7 mm	5	—	

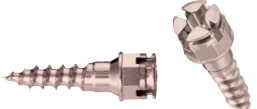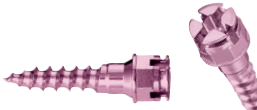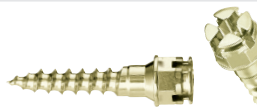Cod		Mărire	Dimensiune	OrthoEasy	OrthoEasy Pal
1101A2306	 6 mm	6 x 1,7 mm Slot .022"	5		—
1101A2308	 8 mm	8 x 1,7 mm Slot .022"	5		—
1101A2310	 10 mm	10 x 1,7 mm Slot .022"	5		—
1201A2308	 8 mm	8 x 1,7 mm	5	—	

Instrumentar



Sunt disponibile mâneri și lame pentru piesele de mână angulate. Marcajele cu laser sunt foarte vizibile și ajută la alinierea perfectă a sloturilor din mini-implanturi. Prin urmare, nu este necesară o reajustare după îndepărtarea lamei.

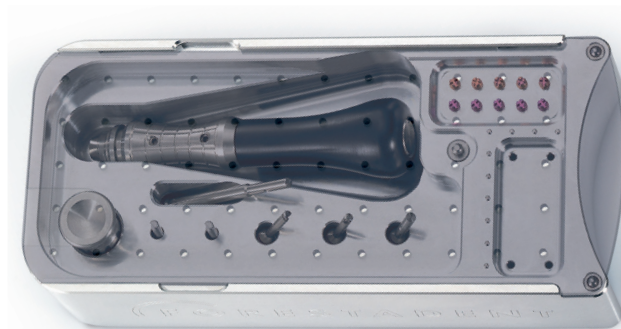


Containerul OrthoEasy® menține instrumentele și mini-implanturile în siguranță și sterilizate. Acestea pot fi scoase din container, fără să fie atinse (alinie verticală a instrumentelor și a mini-implanturilor). Capac din plastic transparent pentru o mai bună prezentare a materialelor aseptice.

Auxiliarele mini-implanturilor OrthoEasy®



Tubușorul culisabil cu tijă verticală se poziționează la aceeași înălțime față de centrul de rezistență și se aplică pentru re tracția în masă și mecanica de alunecare.

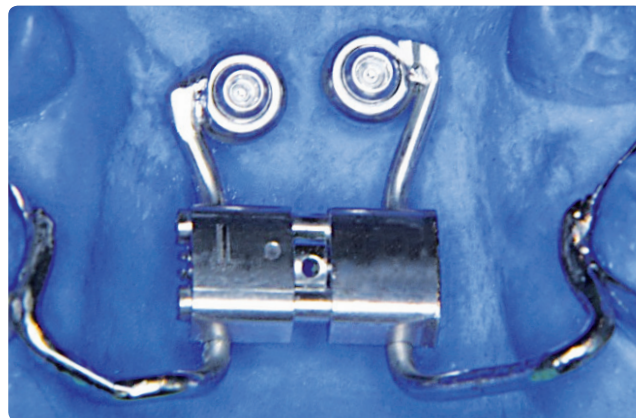


Bonturile palatinale pentru cuplarea ușoară a dispozitivelor fabricate în laborator sau a OrthoEasy® Pal (exemplu: dispozitivele Frog sau disjunctoarele).



Space jet permite o închidere a spațiilor sigură, rapidă și blândă, cu o minimă intervenție clinică.



Uprighting-ul molarilor cu ancorare directă pe mini-implanturi.

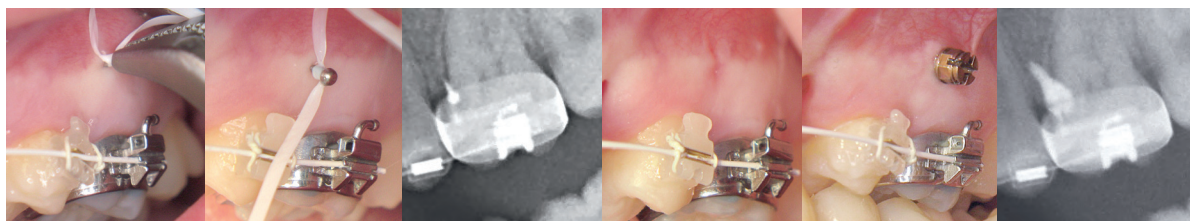


Mini-implanturile radiografice folosite pentru diagnosticarea pre-chirurgicală a structurilor anatomiche.

Noul dispozitiv Frog II pentru distalizarea molarilor

Caracteristicile noului produs



Cele două brațe lungi de retenție (Ø 1.5 mm) lasă suficient spațiu pentru a putea fi individualizate.

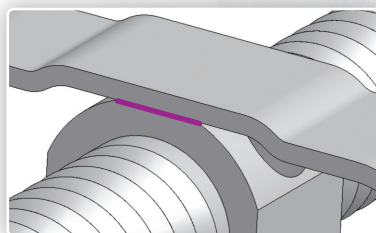

Blocarea șurubului, semnalizată printr-un sunet, previne revenirile necontrolate.



Noul dispozitiv Frog II este activat cu o cheiță, asemănător șuruburilor convenționale de expansiune.



Blocarea șurubului a fost transferată dinspre palatinal spre lingual și, de aceea, este mai accesibilă.




Dispozitivul Frog este potrivit pentru distalizarea molarilor fără a produce înclinații și poate fi ancorat palatinal cu OrthoEasy® Pal. O versiune avansată a acestui dispozitiv este disponibilă acum, sub numele de Frog II.


Produse de bază

Cod		Descriere	Conținut	OrthoEasy	OrthoEasy Pal
1199-0006	 CE	Lamă scurtă OrthoEasy® 10 mm – Octogonal pentru șurubelniță	1		–
1199-0015	 CE	Lamă lungă OrthoEasy® 45 mm – Octogonal pentru șurubelniță	1		–
1199-0007	 CE	Lamă OrthoEasy® 5 mm – Octogonal pentru piesa contraunghi	1		
1199-0008	 CE	Lamă OrthoEasy® 10 mm – Octogonal pentru piesa contraunghi	1		
1199-0002	 CE	Mâner șurubelniță pentru mini-implanturile OrthoEasy®, dimensiune standard	1		–
1299-1001		Analog de laborator pentru mini-implanturile palatine	1	–	
1299-1003	 CE 0297	Șurub de fixare pentru mini-implanturi palatine	10	–	
1299-1004	 CE 0297	Bont palatinal	10	–	
1299-1005	 CE	Capă amprentare	10	–	
1299-1006	 CE	Suport freză mini-implanturi pentru piesa contraunghi manuală și piesa torque	1	–	

Produse opționale

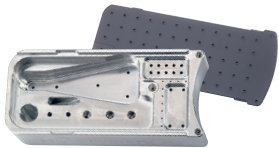Cod		Descriere	Conținut	OrthoEasy	OrthoEasy Pal
1199-1040	 CE 0297	Freză pilot OrthoEasy® 1 mm x 4 mm	1		—
1099-8000	 CE 0297	Mini-implant radiografic pentru marcarea punctelor de inserție pe radiografia de control	20		—
1199-0000		Container OrthoEasy® (fără instrumente și șurubelnițe), pentru instrumente și mini-implanturi	1		
1299-0007	 CE	Piesă torque pentru mini-implanturi OrthoEasy® Pal (Moment de torsiune 10 Ncm)	1	—	
1299-1007	 CE	Șurubelniță manuală pentru piesa contraunghi	1		

Accesorii

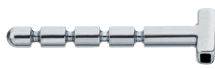Cod		Descriere	Conținut	OrthoEasy	OrthoEasy Pal
A167D1639	 CE 0297	Șurub pentru dispozitivul Frog II	1	—	
100-0009	 CE	Cheie pentru șuruburi palatine	1	—	
307-1012	 CE 0297	Memory Titanol® - arc pentru uprighting-ulmolarilor	10		—
307-1010					
307-1060	 CE 0297	Tubușor culisabil cu tijă verticală .018"	10		—
307-1065		Tubușor culisabil cu tijă verticală .022"			
307-1070	 CE 0297	Space Jet	2		—



Intrarea Ezăreni Nr.6, Et. 1, Ap. 1, Sector 1, București, ROMÂNIA
Tel: 021/430.12.87; Fax: 021/430.12.87;
e-mail: sales@dentalfocus.ro
www.dentalfocus.ro

