




Bracket GLAM®
Absolut insesizabil

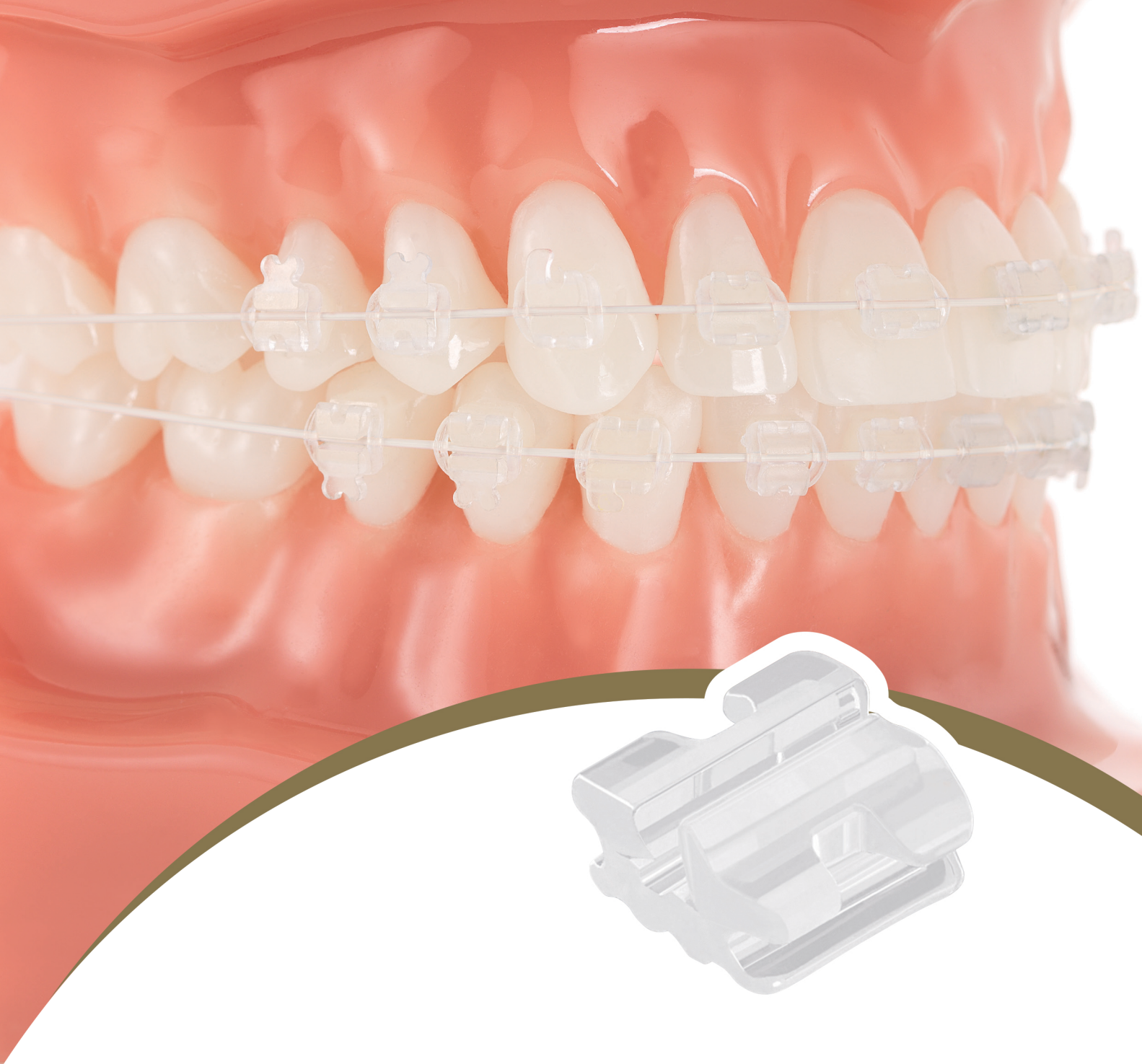



Bracket GLAM®

Pur și simplu vă face pacienții să arate bine

Bracketurile ceramice sunt complet transparente și, prin urmare, pot îndeplini dorințele legate de estetică ale celor mai pretențioși pacienți. Un avantaj semnificativ, pentru medicul ortodont, este că acest bracket nou din ceramică se poate decola ușor fără niciun risc de ciobire.

Bracketurile GLAM îmbunătățesc aspectul pacientului și simplifică munca dumneavoastră.

Pur și simplu frumos

Adulții, dar și din ce în ce mai mulți pacienți tineri apelează la tratamentele ortodontice cu materiale estetice. Noile bracketuri GLAM®

de la Forestadent vă permit să îndepliniți această dorință fără a face niciun compromis. Datorită structurii inovative a ceramicii policristalină, acest bracket este total insesizabil. În timp ce suprafețele multor bracketuri produc reflexii severe care atrag atenția într-un mod nedorit, bracketurile GLAM® oferă

o opalescență delicată, datorită suprafeței mate și discrete. O altă caracteristică excelentă o reprezintă transluciditatea lor remarcabilă. Întrucât bracketurile nu au nicio culoare, acestea preiau nuanța dinților pacientului, lăsând astfel să strălucească frumusețea naturală.

GLAM® oferă, însă, și mai mult: slotul cu margini rotunjite reduce fricțiunea, protejând totodată suprafața arcurilor estetice. Atunci când sunt utilizate împreună cu arcurile BioCosmetic®, bracketurile GLAM® preiau imediat culoarea dinților, realizând o soluție estetică perfectă și completă. Chiar și pacienții cei mai pretențioși vor fi impresionați.

Funcționalitate fără compromisuri
Bracketul GLAM® este fabricat dintr-o singură bucată de ceramică. Astfel, forțele clinice sunt transferate eficient și cu acuratețe de la slot către bază.

Noua metodă de fabricare a bracketurilor GLAM® conduce la obținerea unui slot mai precis, rotunjit.

Ceramica nu trebuie să se ciobească

Cei mai mulți pacienți apreciază avantajele estetice ale bracketurilor ceramice. Foarte puțini cunosc, însă, problemele ce pot apărea în

timpul decolării. Pentru mulți medici ortodonți, gândul că bracketurile din ceramică s-ar putea ciobi sau sparge la decolare constituie un motiv de îngrijorare. Pentru a combate acest risc, Forestadent și-a concentrat experiența producând cu succes trei generații de bracketuri QuickKlear®. Inspirându-se din utilizarea facilă și mai ales din decolarea ușoară a acestora, bracketurile GLAM® au fost special proiectate pentru a putea fi îndepărtate cu instrumentul Pauls fără a se ciobi sau sparge.


În cea mai bună companie

Din punct de vedere estetic, bracketurile GLAM® se găsesc în cea mai bună companie. Atunci când sunt utilizate împreună cu arcurile estetice BioCosmetic®, rezultă o combinație perfectă. Chiar dacă sunt utilizate pe o perioadă îndelungată, își păstrează culoarea și astfel rămân neschimbate pe parcursul întregului tratament. Atunci când se utilizează și ligaturi elastice transparente sau ligaturi metalice fizionomice, efectul estetic este perfect.


În cazul pacienților cu overbite extrem, incisivii superiori vin de multe ori în contact cu bracketurile din ceramică de pe arcada inferioară. Pentru a preveni acest fapt, mulți ortodonți apelează la un tratament combinat: utilizează bracketuri ce-

ramice pe suprafața vestibulară la maxilar și bracketuri linguale la mandibulă.


Pentru asemenea cazuri clinice, sistemul de bracketuri linguale 2D® de la Forestadent reprezintă o alternativă excelentă. Bracketurile linguale 2D® sunt extrem de plate, ceea ce asigură cel mai eficient tratament și cel mai înalt grad de confort pentru pacient.

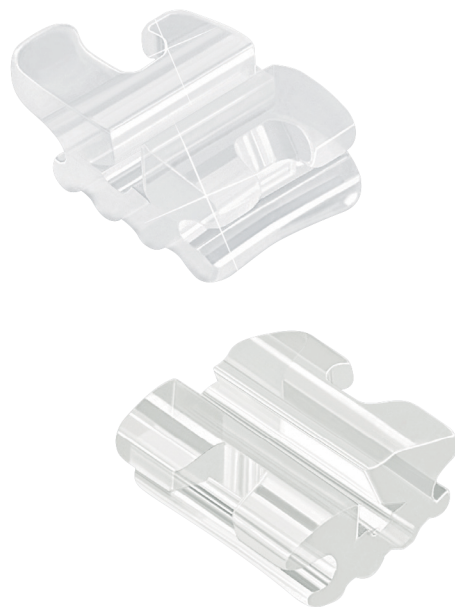

Nou: Marcaje cu culori pentru identificarea mai ușoară a bracketurilor. Marcarea slotului pentru colarea mai ușoară a bracketului.

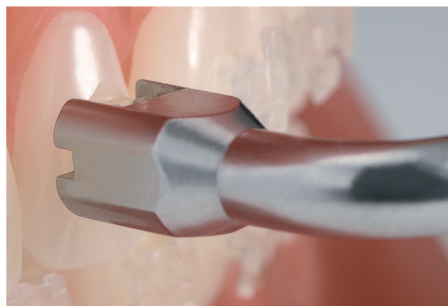

Bracketul GLAM® de la Forestadent este cel mai recent bracket standard. Datorită translucidenței optime, acesta este foarte estetic. Slotul cu margini rotunjite permite utilizarea arcurilor BioCosmetic®. Cu bine-cunoscutul instrument Pauls, bracketurile GLAM® pot fi decolate fără nicio problemă.

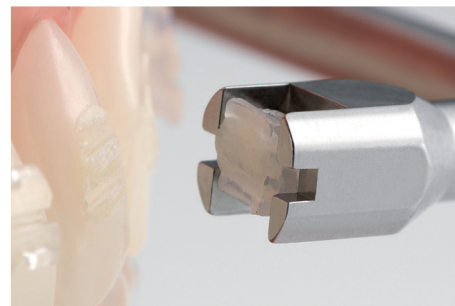


Bracketurile GLAM®

Prescripția Roth



CE 0297

Codurile de culoare

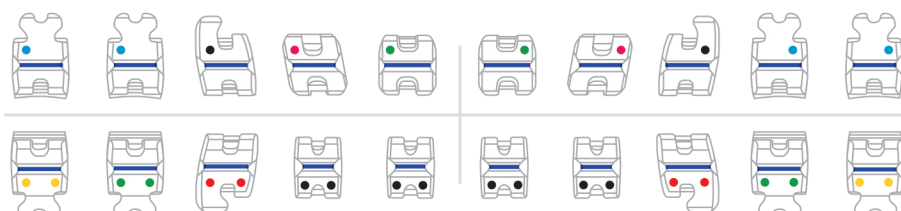

Bracketurile GLAM® - prescripția Roth

Maxilar					Slot .018"		Slot .022"	
Dinte	Torque	Angulație	In/Out	Rotație	Cod		Cod	
					Dreapta	Stânga	Dreapta	Stânga
1 Centrali	+12°	+5°	1,0	–	G764-0103	G763-0103	G764-0101	G763-0101
2 Laterali	+8°	+9°	1,5	–	G764-0203	G763-0203	G764-0201	G763-0201
3 Canini	-2°	+11°	1,0	4° mezial	G764-0303	G763-0303	G764-0301	G763-0301
	-2°	+11°	1,0	4° mezial	G764-0313	G763-0313	G764-0311	G763-0311
4 Premolari	-7°	0°	1,0	–	G764-0503	G763-0503	G764-0501	G763-0501
	-7°	0°	1,0	–	G764-0513	G763-0513	G764-0511	G763-0511
5 Premolari	-7°	0°	1,0	–	G764-0503	G763-0503	G764-0501	G763-0501
	-7°	0°	1,0	–	G764-0513	G763-0513	G764-0511	G763-0511

Mandibulă					Slot .018"		Slot .022"	
Dinte	Torque	Angulație	In/Out	Rotație	Cod		Cod	
					Dreapta	Stânga	Dreapta	Stânga
1 Centrali	0°	0°	1,5	–	G763-1203	G763-1203	G763-1201	G763-1201
2 Laterali	0°	0°	1,5	–	G763-1203	G763-1203	G763-1201	G763-1201
3 Canini	-11°	+7°	1,0	2° mezial	G764-1403	G763-1403	G764-1401	G763-1401
	-11°	+7°	1,0	2° mezial	G764-1413	G763-1413	G764-1411	G763-1411
4 Premolari	-17°	0°	0,7	–	G763-1503	G763-1503	G763-1501	G763-1501
	-17°	0°	0,7	–	G763-1513	G763-1513	G763-1511	G763-1511
5 Premolari	-22°	0°	0,7	–	G763-1603	G763-1603	G763-1601	G763-1601
	-22°	0°	0,7	–	G763-1613	G763-1613	G763-1611	G763-1611

Seturi

Variație	Slot .018"		Slot .022"	
Seturi	1	3	1	3
	G706-0700	G706-0701	G706-0705	G706-0706
3	G706-0710	G706-0711	G706-0715	G706-0716
3-5	G706-0720	G706-0721	G706-0725	G706-0726


Bracketurile GLAM®

Prescripția McLaughlin Bennett 5.0



CE 0297

Coduri de culoare

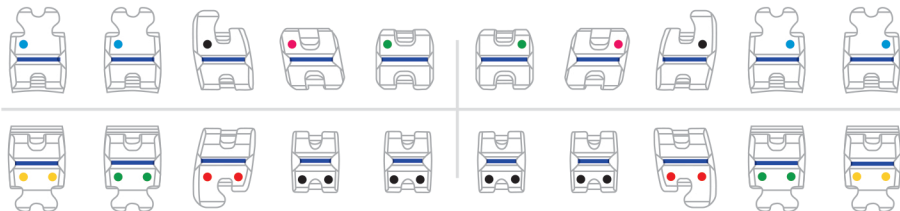

GLAM-prescripția McLaughlin Bennett 5.0

Maxilar					Slot .018"		Slot .022"	
Dinte	Torque	Angulație	In/Out	Rotație	Cod		Cod	
					Dreapta	Stânga	Dreapta	Stânga
1 Centrali	+17°	+4°	1,25	–	G762T0103	G761T0103	G762T0101	G761T0101
2 Laterali	+10°	+8°	1,5	–	G762T0203	G761T0203	G762T0201	G761T0201
3	Canini	-7°	+8°	–	G762T0303	G761T0303	G762T0301	G761T0301
	Canini+cârlig	-7°	+8°	–	G762T0313	G761T0313	G762T0311	G761T0311
3	Canini	0°	+8°	–	G762T0323	G761T0323	G762T0321	G761T0321
	Canini+cârlig	0°	+8°	–	G762T0333	G761T0333	G762T0331	G761T0331
4	Premolari	-7°	0°	–	G762T0503	G761T0503	G762T0501	G761T0501
	Premolari+cârlig	-7°	0°	–	G762T0513	G761T0513	G762T0511	G761T0511
5	Premolari	-7°	0°	–	G762T0503	G761T0503	G762T0501	G761T0501
	Premolari+cârlig	-7°	0°	–	G762T0513	G761T0513	G762T0511	G761T0511

Mandibulă					Slot .018"		Slot .022"	
Dinte	Torque	Angulație	In/Out	Rotație	Cod		Cod	
					Dreapta	Stânga	Dreapta	Stânga
1 Centrali	-6°	0°	1,5	–	G761T1203	G761T1203	G761T1201	G761T1201
2 Laterali	-6°	0°	1,5	–	G761T1203	G761T1203	G761T1201	G761T1201
3	Canini	-6°	+3°	–	G762T1403	G761T1403	G762T1401	G761T1401
	Canini+cârlig	-6°	+3°	–	G762T1413	G761T1413	G762T1411	G761T1411
3	Canini	0°	+3°	–	G762T1423	G761T1423	G762T1421	G761T1421
	Canini+cârlig	0°	+3°	–	G762T1433	G761T1433	G762T1431	G761T1431
4	Premolari	-12°	0°	–	G761T1503	G761T1503	G761T1501	G761T1501
	Premolari+cârlig	-12°	0°	–	G761T1513	G761T1513	G761T1511	G761T1511
5	Premolari	-17°	0°	–	G761T1603	G761T1603	G761T1601	G761T1601
	Premolari+cârlig	-17°	0°	–	G761T1613	G761T1613	G761T1611	G761T1611

Seturi

Canini superiori -7° torque, canini inferiori -6° torque

Canini 0° Torque

Variație	Slot .018"		Slot .022"	
Seturi	1	3	1	3
	G706T0759	G706T0760	G706T0735	G706T0736
	G706T0762	G706T0763	G706T0740	G706T0741
	G706T0765	G706T0766	G706T0745	G706T0746



Slot .018"		Slot .022"	
1	3	1	3
G706T0773	G706T0774	G706T0767	G706T0768
G706T0775	G706T0776	G706T0769	G706T0770
G706T0777	G706T0778	G706T0771	G706T0772

Auxiliare

C501-0815 CE		1	Instrument Pauls pentru decolarea bracketurilor GLAM® și QuicKlear® - două capete
G950-1000		1	Tipodont cu bracketuri GLAM®

BioCosmetic® - Formă standard

Ambalate individual

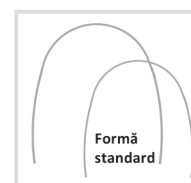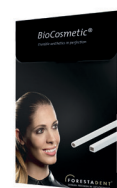

Descriere	Cod Maxilar	Cod Mandibulă	Secțiune	Forță	Dimensiune inch	Dimensiune mm	Conținut pachet
BioCosmetic Superelastic 	217-0845	217-0945	●	25 g	.017"	0,43	10
	217-0850	217-0950	●	35 g	.019"	0,48	10
	217-1440	217-1540	■	55 g	.016" x .016"	0,40 x 0,40	10
	217-2040	217-2140	■	90 g	.016" x .022"	0,41 x 0,56	10
	217-2046	217-2146	■	135 g	.018" x .025"	0,46 x 0,64	10